

# GEC Roter Taster Patientenzimmer

## Bedienungsanleitung und Anwendung



### Beschreibung

Die Rufauslöser sind Zimmermodule der GEC Produkteserie. Sie sind mit dem Zimmerbus verbunden und gestatten es, über den Zimmer Manager Rufe auszulösen. Die Zimmermodule können Tasten und/oder Buchsen sowie eine Zugschnur enthalten.

Zu jeder Taste oder Buchse gehört eine LED-Indikatorlampe (4). Nach neuer Norm darf nur noch das Gerät leuchten, welches ausgelöst hat. Das heisst die Quittiereinheit beim Eingang leuchtet nicht mehr.

Der Betrieb der Zimmermodule wird fortlaufend über den verbundenen Zimmermanager überwacht. Dies ermöglicht es, Störungsmeldungen bei einem Ausfall direkt an die Technische Leitstelle zu melden.

### Funktion Normalruf

Drücken Sie einmal den roten Ruftaster (1), um einen Ruf auszulösen. Das LED-Lämpchen (4) leuchtet rot und dient als Beruhigungslampe, dass der Ruf erfolgreich abgesetzt wurde.

### Funktion Stürmen mit Anwesenheit

Wenn die Anwesenheit eingeschalten ist und ein Zimmermodul ausgelöst wird, so wird automatisch ein Notruf abgesetzt.

### Funktion Taster (1)

Drücken Sie einmal den roten Ruftaster (1), wird ein Normalruf mit Standort Esstisch (Bsp. [878.E](#)) abgesetzt.