


# GEC blauer Taster Patientenzimmer

## Bedienungsanleitung und Anwendung

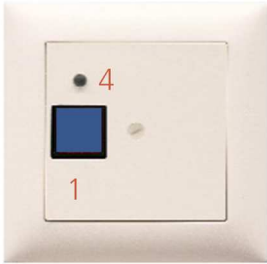

### Beschreibung

Die Rufauslöser sind Zimmermodule der GEC-Produktserie. Sie sind mit dem Zimmerbus verbunden und gestatten es, über den Zimmermanager Rufe auszulösen. Die Zimmermodule können Tasten und/oder Buchsen sowie eine Zugschnur enthalten.

Zu jeder Taste oder Buchse gehört eine LED-Indikatorlampe (4). Nach neuer Norm darf nur noch das Gerät leuchten, welches ausgelöst hat. Das heisst die Quittiereinheit beim Eingang leuchtet nicht mehr.

Der Betrieb der Zimmermodule wird fortlaufend über den verbundenen Zimmermanager überwacht. Dies ermöglicht es, Störungsmeldungen bei einem Ausfall direkt an die Technische Leitstelle zu melden.

### Funktion Stürmen ohne Anwesenheit

Drücken Sie einmal den blauen Ruftaster (1), um einen Ruf auszulösen. Das LED-Lämpchen (4) blinkt abwechselnd rot/blau und dient als Beruhigungslampe, dass der Ruf erfolgreich abgesetzt wurde.

### Funktion Taster (1)

Drücken Sie einmal den blauen Ruftaster (1), wird der Ruf Stürmen ohne Anwesenheit (Bsp. 878.R) abgesetzt.