

## ParCom Medaillon

### Bedienungsanleitung



1. Druckknopf
2. LED-Anzeige
3. Magnetkontakt

#### Rufauslösung

Drücken Sie einmal den Druckknopf, um einen Ruf auszulösen. Die LED-Anzeige leuchtet kurz auf und gibt Rückmeldung, ob der Ruf abgesetzt wurde (grün) oder nicht (rot).

#### Quittierung

Drücken Sie für die Rufquittierung dreimal schnell den Druckknopf oder halten Sie den Magneten mindestens eine Sekunde an den Magnetkontakt. War die Quittierung erfolgreich, dann leuchtet die LED-Anzeige grün auf.

#### Einschalten

1x den Druckknopf drücken (LED-Anzeige leuchtet weiss), sobald die LED erlischt,

2x schnell den Druckknopf drücken (LED-Anzeige leuchtet 2x blau)

Die LED-Anzeige leuchtet violett, wenn das Medaillon erfolgreich eingeschaltet wurde.

Bei nicht erfolgreichem Einschalten muss 10 Sekunden gewartet werden.

#### Ausschalten

1. Druckknopf 10 Sekunden gedrückt halten.

2. Die LED-Anzeige pulsiert rot.

3. Sobald die LED-Anzeige durchgehend rot leuchtet, halten Sie sofort einen Magnet auf den Magnetkontakt.

4. Die LED-Anzeige leuchtet violett auf.

#### Batteriewechsel

Bitte beachten Sie, dass Sie eine Batterie mit der Mindeststromstärke von 20mA verwenden. Ansonsten schaltet das Medaillon selbständig aus. Wir empfehlen die muRata C2032 Lithium 3 V Batterie einzusetzen.



#### Schritt 1

Lösen Sie die vier Schrauben mit einer Torx T5.



#### Schritt 2

Nehmen Sie den gelösten Deckel ab. Entnehmen Sie die Batterie vorsichtig.



#### Schritt 3

Setzen Sie die neue Batterie ein.



#### Schritt 4

Befestigen Sie den Deckel wieder mit den vier Schrauben und achten Sie darauf, dass der Dichtungsring korrekt eingesetzt ist.

Masse (LxBxT)	50x38x13mm
Gewicht	23g
Reichweite drinnen/draussen	25-30m / 100m
Stromverbrauch (max.)	30mA
Spannung	3 V DC
Autonomie	18 Monate
Material	PC + ABS
IP Schutzindex	IP65
Sende- / Empfangsleistung	25mW und 12 dbm